

2012年4月改訂  
貯法：室温保存

日本標準商品分類番号

8 6 9 9

# パッチテスター「トリイ」


本品は、伸縮性ならびに透湿性の優れたウレタンフィルムを使用し、皮膚に優しくフィットする皮膚テスト用のテープです。

## 【材 質】


テープ	ポリウレタン
パッド	綿100%不織布（片面ポリエステルフィルム貼り）
白色カバー紙	グラシン紙
フィルム	ポリエチレンテレフタレート（PET）
粘着剤	アクリル系粘着剤

## 【使用方法】


1.表面のパッド上に試薬を識別する記号を記す。

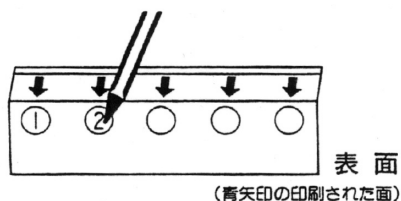


2.裏面の白色カバー紙を剥がし、パッドに試薬を滴下または塗布する。

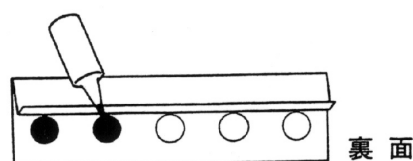

3.皮膚に貼付し、残りの白色カバー紙を剥がす。

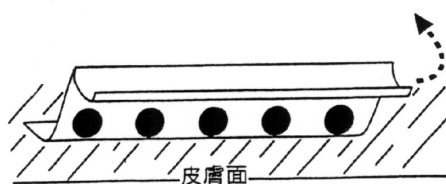

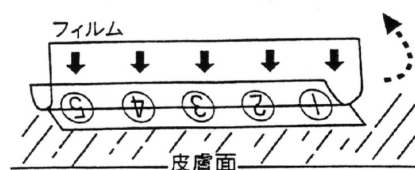

4.矢印の印刷されたフィルムを剥がす。



## 【サイズ・包装】

サイズ	パッド直径	パッド数	包装
113mm×32mm	9mm	5	1箱20枚 1箱50枚

販売元  烏居薬品株式会社  
東京都中央区日本橋本町3-4-1

製造販売元  リバテープ製薬株式会社  
熊本県熊本市北区植木町岩野45